

**SISTAR s.a.s.**

Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza – Edificio 14
20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it – e-mail: info@sistar.it

 **NOTA INFORMATIVA**

Denominazione: ORANGE GRIP	
Data: 10/10/2018	
Rev: 00	

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso senza polvere non sterile ■ **Materiale:** nitrile ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** arancione ■ **Finitura:** guanto esternamente puntinato ■ **Imballo:** 50 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1,5 (livello G1)
CONFORMITA' E PRESTAZIONI

Dispositivo Protezione Individuale cat III

0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV)



Reg UE 2016/425 - EN 420:2003 + A1 2009, EN 374-1:2016 TIPO B, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016

	EN 374-1 : 2016 TIPO B		EN 374-4:2013	DIMENSIONI					
	Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione	Cod./Taglia	Lungh. mm	Largh. mm			
Acido solforico 96%	2	>30'	100%	553.2755.M (8)	250	90-99			
Sodio idrossido 40%	2	>30'	11.9%						
Dietilammina	2	>30'	78.1%						
							553.2755.L (9)	260	100-109
							553.2755.XL (10)	270	110-119
				553.2755.XX L (11)	280	120-129			

Spessore mm	Palmo (+/- 0.03)	0.12
-------------	------------------	------

CONSIGLI DI UTILIZZO

Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Il guanto è idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica. ■ I risultati sono ottenuti in condizioni di laboratorio e possono non riflettere la durata effettiva sul posto di lavoro



SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza – Edificio 14
20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it – e-mail: info@sistar.it

AVVERTENZE

■ Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto ■ Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Il guanto è un dispositivo soggetto a usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ In rari casi si possono verificare reazioni cutanee transitorie e reazioni di ipersensibilità ■ In caso di reazione sospendere l'utilizzo

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

■ Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali